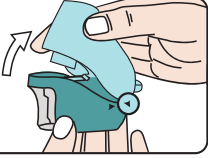
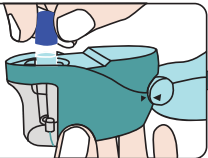
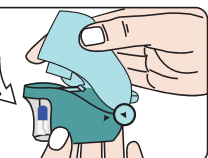
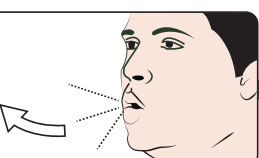
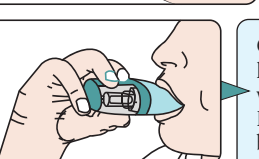
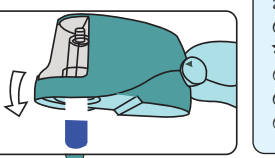


Instruction for use of **Respihaler**

রেসপিহেলার ব্যবহারবিধি

	<p>To open the Respihaler, hold the base of the Respihaler with one hand and pull up the mouthpiece till the direction two arrows meet.</p> <p>রেসপিহেলার খোলার জন্য নিচের অংশ এক হাতে ধরুন এবং মাউথপিসটি উপরের দিকে টানুন যাতে নির্দেশিত দুটি তীর একত্রে মিলিত হয়।</p>
	<p>Place the Respicap into the capsule chamber so that the transparent part stays down.</p> <p>রেসপিক্যাপটি ক্যাপসুল চেম্বারে এমনভাবে স্থাপন করুন যাতে স্বচ্ছ অংশ নিচে থাকে।</p>
	<p>Close the mouthpiece firmly until a click sound is heard which indicates proper locking of the Respihaler.</p> <p>মাউথপিসটি দৃঢ়ভাবে বন্ধ করুন যতক্ষণ না ক্লিক শব্দ হয়, যা নির্দেশনা দেয় রেসপিহেলার সঠিকভাবে লক হয়েছে।</p>
	<p>Breathe out completely.</p> <p>পুরোপুরি শ্বাস ছাড়ুন।</p>
	<p>Grip the mouthpiece between your mouth and close your lips around it. Keep your head upright and breathe as deeply as you can, if done correctly, the Respicap will vibrate inside the Respihaler.</p> <p>রেসপিহেলার মুখের কাছে নিন এবং আপনার ঠোঁট মাউথপিসের চারপাশে ভালোভাবে বন্ধ করুন। আপনার মাথা সোজাভাবে রাখুন এবং মুখ দিয়ে জোরে শ্বাস নিন, যদি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, রেসপিহেলারের ভেতর রেসপিক্যাপটির কম্পনের শব্দ পাওয়া যাবে।</p>
	<p>Remove the Respihaler from your mouth & hold your breath as long as comfortable then resume normal breathing. At times, step 5 may be repeated to ensure that all the powder has been inhaled.</p> <p>রেসপিহেলার মুখের ভেতর থেকে বের করুন এবং যতক্ষণ সহজে শ্বাস ধরে রাখা যায় ধরে রাখুন, এই সময় রেসপিক্যাপের পাউডার পুরোপুরি শ্বাস নেওয়ার সাথে খালি না হওয়া পর্যন্ত ৫ম ধাপ পুনরায় করুন।</p>

After every use, open the mouthpiece again to discard the used Respicap. Then close the mouthpiece and store in the pouch provided for the next use.

প্রতিবার ব্যবহারের পর মাউথপিসটি খুলুন এবং ব্যবহৃত রেসপিক্যাপটি ফেলে দিন। এরপর মাউথপিসটি বন্ধ করুন এবং পরবর্তী ব্যবহারের জন্য পাউচের ভেতর সংরক্ষণ করুন।

সাবধানতা: ভেজা অবস্থায় রেসপিহেলার ব্যবহার করবেন না।

কিভাবে রেসপিহেলার পরিষ্কার করতে হবে:

যখন প্রয়োজন হবে, তখন একটি শুকনো কাপড় দিয়ে রেসপিহেলারের মাউথপিস্ এবং ক্যাপসুল চেম্বারটি পরিষ্কার করে নিন।